

## MANEJO DE UN DERRAME ACCIDENTAL DE QUIMIOTERAPIA

### PARA DERRAMES ACCIDENTALES O FUGAS DE TUBOS:


Siga las instrucciones a continuación y comuníquese con su proveedor de atención.

### IMPORTANTE:

- Utilice siempre dos pares de guantes al tratar con un derrame.
- Notifique a su proveedor de atención médica que se ha producido un derrame.
- Limpiar el derrame inmediatamente.

### INSTRUCCIONES:

1. Detenga la infusión.
2. Sujete el tubo de la bomba. Consulte las imágenes a continuación.

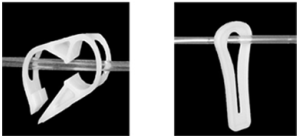

3. Limpie inmediatamente los derrames de drogas peligrosas. Use guantes protectores y seque el derrame con una toalla de papel.
4. Deseche todos los materiales utilizados para la limpieza en la bolsa plástica Ziplock para derrame de quimioterapia.
5. Quítese inmediatamente la ropa sucia con medicamento.
6. Cuando manipule ropa de cama o ropa sucia con medicamentos, no toque el área sucia con las manos descubiertas desnudas. Coloque inmediatamente la ropa de cama o la ropa en la lavadora. Lave las prendas por separado del resto de la ropa en agua caliente. Si no puede lavar estos artículos inmediatamente, colóquelos en una bolsa de plástico sellada hasta que pueda lavarlos.

### SI EL MEDICAMENTO HA ENTRADO EN SU PIEL/OJOS:

1. Los medicamentos de quimioterapia que se derraman sobre la piel pueden causar irritación. Lave bien el área con agua y jabón; luego seque el área. Observe la piel durante los próximos 7 días. Comuníquese con su proveedor, si se produce enrojecimiento o irritación de la piel.
2. Si el medicamento entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos con agua del grifo durante al menos 15 minutos. Luego, comuníquese con su proveedor de atención médica.

### ELIMINACIÓN DE ARTÍCULOS EXPUESTOS A LA QUIMIOTERAPIA:

1. Coloque todos los suministros que entren en contacto directo con la quimioterapia en una bolsa especialmente marcada para desechos peligrosos.
2. Sella la bolsa de residuos y siga las instrucciones de su proveedor para desechar la bolsa correctamente.